

MJB5 Plus模块化接线盒——集成AOC (模拟信号-OpenBus™ 转换模块)

产品数据表



内容

介绍3

MJB5 Plus 509版本3

功能和选项3

使用3

MJB5 Plus AOC使用说明.....4

订购示例5

介绍

MJB5 Plus模块化接线盒专为与OpenBus™控制盒配套使用而设计。其支持连接多个手控器及护理员控制器。还可用于为电子设备充电,或连接床底灯(UBL)及第三方产品。MJB5 Plus的紧凑型设计及在线电缆管理系统,使其易于集成至医疗床、手术台、治疗椅等各类医疗设备中。具备IPX6耐清洗消毒防护等级,完美匹配OpenBus™控制盒。其IPX6防水等级与DURA™耐冲洗设计可显著延长设备使用寿命,能够适应高压冲洗管道环境。

MJB5 Plus 509版本

AOC是一款模拟信号至OpenBus™的转换模块。特别适合医疗应用,满足客户在OpenBus™系统中接入自有产品或第三方控制设备(如多功能脚踏开关)的需求。提供带/不带Power Request功能的版本。



功能和选项


连接:	最多支持3个不同类型、采用模块化插孔连接的控制器,或最多16路模拟开关输入(用于连接第三方设备)
颜色:	浅灰色(RAL 7035)
防护等级:	IPX6, IPX6 Washable DURA™(耐清洗消毒)
电流消耗:	取决于处于激活状态的输入信号的数量
	VBus: 5-12mA
	VPermanent:0-16mA

使用

运行温度:	+5 °C 至 +40 °C
存储温度:	-10 °C 至 +50 °C
兼容性:	支持力纳克低功耗蓝牙(BLE)控制盒。请联系力纳克。
相对湿度:	20% 至 80%(无冷凝)
气压:	700 至 1060 hPa
海拔高度:	最高 3000 m
不含乳胶:	是
认证:	IEC60601-1 ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA-22.2 No 60601-1

MJB5 Plus AOC使用说明

兼容性:适用于除CB20外的所有OpenBus™控制盒。

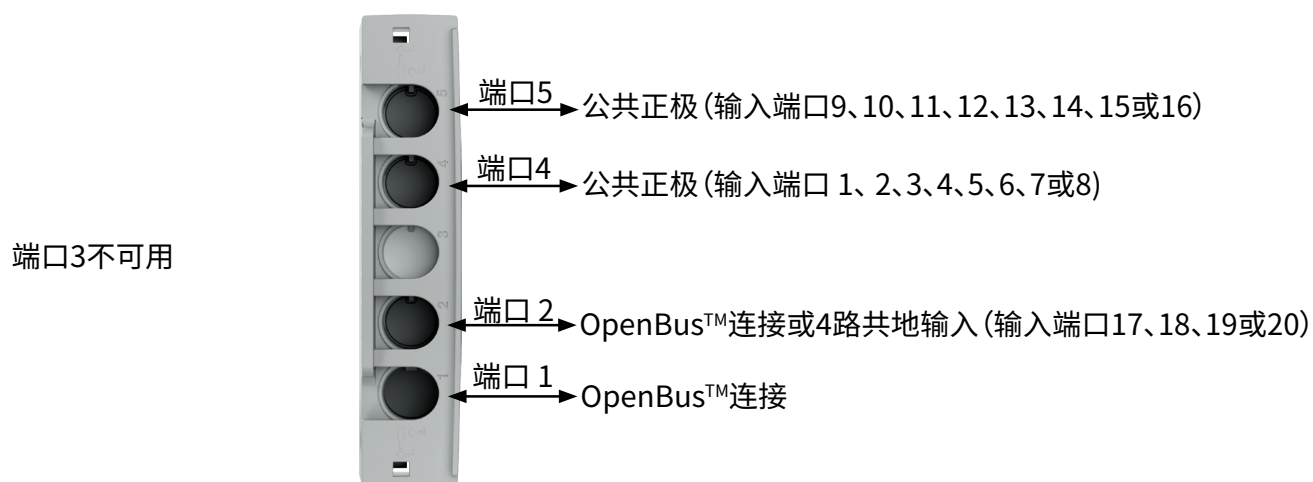

已添加产品标签, 便于正确连接到端口



MJB5 AOC具备4个端口:

端口1专用于OpenBus™连接。

端口2可配置为4路共地开关输入或OpenBus™手动控制。

端口4可配置为8路共地开关输入或模拟手动控制。

端口5可配置为8路共地开关输入或模拟手动控制。

端口1用于连接控制盒, 端口2可用于OpenBus™控制。标准输入设计允许包含模拟手动控制的系统在端口4或端口5上兼容使用OpenBus™控制盒。

订购示例

MJB		
特殊/标准代码编号	000	000 = 端口拓展盒（无功能） 502 = SMPS 4W (开关电源) 504 = 网关 505 = 内置床底灯（UBL） /开关信号输入（S1+S2） 506 = 外置床底灯（UBL） /开关信号输入（S1+S2） 509 = 模拟至OpenBus™ 的转换模块
OPENBUS™ 连接数量	4	1 = 用于标准代码：502（端口：1=OB, 2=第三方） 用于标准代码：504（端口：1=OB, 5=第三方） 3 = 用于标准代码：000（端口3） 4 = 用于标准代码：000（端口4） 用于标准代码：505、506和509 5 = 用于标准代码：000（端口5）
配置编号	000	000 = 端口拓展盒（无功能） 001-099 = 标准配置 100-999 = 特殊配置
未使用	-	- = 未使用
颜色	1	1 = 浅灰色（RAL 7035）
硬件版本	0	0 = 无Power Request功能 1 = 全端口Power Request硬件版本（在可用端口上） 2 = 端口2Power Request硬件版本（仅限MJB509） 3 = 端口4和5Power Request硬件版本（仅限MJB509）
IP防护等级	2	2 = IPX6 9 = IPX6 Washable DURA™（耐清洗消毒）
电缆	3	3 = 无电缆
所选商品编号		MJB0004000-1023

用于连接OpenBus™ 控制盒与MJB5 Plus的模块化插头电缆需单独订购。

如果需要防护等级为IPX6 Washable DURA™(耐清洗消毒)的产品，请记得订购DURA电缆和伪插头。

使用条款

力纳克致力于为用户提供最准确、最及时的产品信息。但是，用户须自行确定力纳克产品在特定条件下的适用性。由于产品不断改进，力纳克产品可能出现频繁修改和变动。力纳克保留修改、升级和变动的权利，恕不另行通知。故此，力纳克无法保证上述产品所印信息始终正确并与产品现行状态保持一致。

力纳克尽最大努力完成订单。然而，由于上述提及的原因，力纳克无法保证可随时提供任何特定的产品。对于在其网站、产品目录上展示或由力纳克、力纳克子公司或力纳克关联公司编写和制作的其它书面材料中列出的任何产品，力纳克保留停止销售的权力。所有销售活动均需遵守力纳克网站提供的《销售与交付标准条款》。力纳克及力纳克标志均为力纳克公司的注册商标。保留所有权利。